

Användningsråd för HandCheck Vision vid hygienutbildning

Vid personalutbildning inom sjukvården är HandCheck Vision till ovärderlig hjälp. Likaså inom livsmedels- och läkemedelsindustrin eller hos restauranger och storkök.

I jämförelse med mikrobiologiska avtryckstester, där det kan ta upp till 48 timmar innan kontamination kan påvisas, så erbjuder HandCheck Vision en ögonblicklig presentation av graden av genomförd handdesinfektion.

HandCheck Vision ökar hygienmedvetandet snabbt och enkelt och leder till förbättrade hygienrutiner.



Övning och simulering av handdesinfektion

Det är lämpligt att i anslutning till användandet av HandCheck Vision öva och simulera korrekt genomförande av handdesinfektion. För det här ändamålet finns därför det speciellt utvecklade fluorescerande testmedlet, Ecocontrast.

Flaskan innehåller ett färdigblandat fluorescerande medel och används på samma sätt som ett normalt handdesinfektionsmedel i utbildningssyfte. Testet upplevs på ett liknande sätt som ett desinfektionsmedel, och övningen blir därför så verklighetstrogen som möjligt.

I HandCheck Vision blir det genast synligt var man missat. I undersökningar har det visats att det ofta missas mellan fingrarna och vid nagelbanden och den högra tumspetsen hos högerhänta. Det korrekta förfaringsättet kan direkt övas och demonstreras i HandCheck Vision. På detta sätt uppnås en bättre användning av handdesinfektionsmedel. Hela övningen kan åskådliggöras med en kamera (extra utrustning) monterad på HandCheck Vision utrustningen som sedan kan kopplas mot en PC eller projektor.

Observera att Ecocontrast endast skall användas i utbildningssyfte och inte är ämnat att användas som handdesinfektionsmedel.

