

Ändra sitthöjd på Swift Mobil-familjen



1. Tag bort lösa delar såsom sits & benstöd




2. Lägg stolen framåt



3. Lås upp med hjälp av låsspaken, en på varje sida.



4. Ta ut de orangea "skruvarna", en på varje sida.

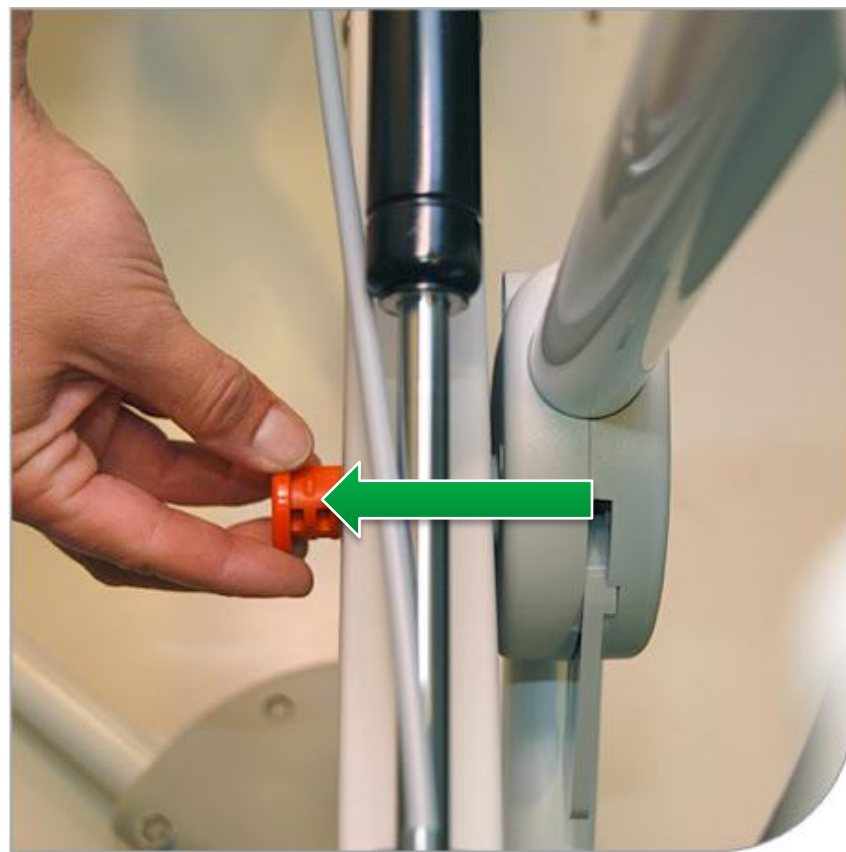

5. Sätt en fot framtill på chassit, greppa den andra delen av chassit. Flytta till önskad höjd.



6. Stoppa in skruvarna, en på varje sida.



Obs!
Formen på
skruven passar
formen på hålet.



7. Lås med låsspak!



8. Kontrollera att skruven är låst genom att trycka på den orange "pricken" på utsidan.



9. Sätt tillbaka sits & benstöd



10. KLAR!



Alternativa sätt....

- Låt Swift stå upprätt, lås upp på samma sätt. Tryck ihop chassit en aningen och flytta till önskad höjd.
- Låt Swift stå upprätt och stå på knä bakom den. Lås upp, lägg ett lätt tryck mot chassit för att trycka isär chassit. Flytta till önskad höjd.