

# Sortimentsöversikt

Bälte

Sele

Band

Vadmatta

Bendelare

## Innehåll

Positioneringsbälte med en fästpunkt .....	1
Positioneringsbälte 1 fästpunkt Weda .....	1
SittBelt Comfort Pro .....	1
Positioneringsbälte med två fästpunkter .....	2
Positioneringsbälte med 2 fästpunkter Weda .....	2
SittBelt Pro.....	2
Antirotationsbälte med två fästpunkter.....	2
Antirotationsbälte .....	2
Lårsele .....	3
Lårsele.....	3
Bröstsele .....	3
Bröstbälte Monoflex .....	3
H-sele .....	3
Sternumstöd .....	4
Sele Y-style .....	4
Monteringsbeslag till h-sele och sternumstöd .....	5
Fmk .....	5
Övre monteringsbeslag.....	5
Infästning övre selar.....	5
Band för arm .....	6
Armbindel .....	6
Band för fot.....	6
Fotrem med kardborre .....	6
Fotrem med skidlås.....	6
Vristsele all-in-one .....	7
Vadmatta.....	8
Vadmatta .....	8
Vadmatta Aeromesh .....	8
Bendelare.....	9
Bendelare .....	9
Övrigt .....	9
Universalband.....	9

## Arbetsgång för montering av bälten och selar

Montering av bälten och selar på hjälpmedel är ett förskrivarens ansvar. Hjälpmedelscentralen förmonterar aldrig bälten i samband med leverans eller reparation. Det är förskrivarens ansvar att montera och justera in bälten och selar.

Vid behov av hjälp vid montering bokas tid med tekniker. Förskrivare är med vid besöket och är ansvarig för var bältet och selet ska placeras och hur det ska justeras in. Rådgivning av bälten och selar samt placering kontakta hjälpmedelskonsulent.

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

### Positioneringsbälte med en fästpunkt



#### Positioneringsbälte 1 fästpunkt Weda

Används för positionering av bäckenet.  
Ett drag från mitten.

Leverantör Fälandbo Production AB

Positioneringsbälte S 1 fästpunkt	10423
Positioneringsbälte M 1 fästpunkt	10424
Positioneringsbälte L 1 fästpunkt	18437



#### SittBelt Comfort Pro

Används för positionering av bäckenet.  
Positioneringsbältet har 1 fästpunkt per sida.  
Storlek S har ett drag från mitten.  
Storlek L har två drag från sidorna.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

SittBelt Comfort Pro stl S 725 spänne	32694
Sittbelt Comfort Pro stl M 740 spänne	40235
SittBelt Comfort Pro stl L 742 spänne	32693

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

## Positioneringsbälte med två fästpunkter



### Positioneringsbälte med 2 fästpunkter Weda

Används för positionering av bäckenet.  
Ett drag från mitten.

Leverantör Fälandbo Production AB

Positioneringsbälte M 2 fästpunkter	10421
Positioneringsbälte L 2 fästpunkter	10422



### SittBelt Pro

Används för positionering av bäckenet.  
Positioneringsbältet har 2 fästpunkter per sida.  
Storlek S och M har ett drag från mitten.  
Storlek L och XL har två drag från sidorna.

Leverantör Anatomic Sitt AB [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

SittBelt Pro stl S 725 spänne	32692
SittBelt Pro stl M 725 spänne	32691
SittBelt Pro stl L 742 spänne	32689
Sittbelt Pro stl XL 740 spänne	40767

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

## Antirotationsbälte med två fästpunkter



### Antirotationsbälte

Ger mycket positionering och motverkar skjuveffekt  
och rotation av bäckenet.

Leverantör Anatomic Sitt AB AB [www.anatomicsitt.se](http://www.anatomicsitt.se)

Antirotationsbälte stl XS	37193
Antirotationsbälte stl S	35848
Antirotationsbälte stl M	34709
Antirotationsbälte stl L	37732

Tips för montering av bälten Anatomic sitt, se bifogad länk [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

## Lårsele



### Lårsele

För brukare som kanar eller tenderar att glida ur rullstolen.  
Lårsele kan användas både med och utan ett höftbälte.  
Det finns en fästmetod.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Lårsele stl Small	40645
Lårsele stl Medium	40644
Lårsele stl Large	40643

## Bröstsele



### Bröstbälte Monoflex

Ett dynamiskt bröstbälte som erbjuder fria armrörelser och ger ett jämt och bekvämt stöd för bålen. Fixspännen på var sida om bältet.  
Bröstbälte ska användas i kombination med höftbälte.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Bröstbälte Monoflex XS	32918
Stödytans längd och bredd 32 x 7,5 cm	
Bröstbälte Monoflex S	32919
Stödytans längd och bredd 40 x 9 cm	
Bröstbälte Monoflex M	32380
Stödytans längd och bredd 48 x 10 cm	
Bröstbälte Monoflex L	30256
Stödytans längd och bredd 55 x 11,5 cm	
Bröstbälte Monoflex XL	32920
Stödytans längd och bredd 64 x 13 cm	



### H-sele

H-selen ger stöd till både axelparti och bål. Den används vid rotation och passar användare som behöver bra uppsträckning av bål och axlar.  
H-selen ska användas i kombination med höftbälte.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

H-sele Pro stl XS	32698
H-sele Pro stl S	31669
H-sele Pro stl M	30930



### Sternumstöd

Sternumstöd är designat för att ge ett behagligt stöd för bål och sternum. Speciellt framtaget för brukare som faller framåt med bålen.

Sternumstödet ska användas i kombination med höftbälte.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

Sternum Pro stl XS	32695
Sternum Pro stl S	30959
Sternum Pro stl M	32696
Sternum Pro stl L	32697



### Sele Y-style

*Ej beställningsbar i Websesam*

Y-style sele är avsedd för brukare med spinal- eller skulderrotation som behöver stöd och kontroll på kroppens ena sida.

Denna sele kan användas både på höger och vänster sida.

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

SeleY-style s (457mm)	38324
SeleY-style m (508mm)	42040
SeleY-style l (610mm)	42469

## Monteringsbeslag till h-sele och sternumstöd



### Fmk

Monteringsats för montering av h-sele och sternumstöd. Monteras runt rullstolens körhandtag/rygggrör. Förhöjningsstag beställs separat.

Kontakta hjälpmedelstekniker innan förskrivning för besked om montering är möjlig på rullstolsmodell och bredd, ska monteras av tekniker.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

Fmk stl 1	35708
Passar rullstolsbredd 22 - 42 cm	
Fmk stl 2	35397
Passar rullstolsbredd 32 – 52 cm	
Förhöjningsstag 25 mm FMK	35398




### Övre monteringsbeslag

Används för att montera H-sele/sternumstöd vid fast ryggplatta. Levereras i par.

Kontakta tekniker innan förskrivning om montering är möjlig på ryggplattan, ska monteras av tekniker

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

Övre monteringsbeslag lång 200mm 26439

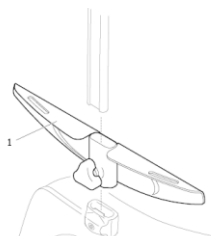

### Infästning övre selar

Används för att montera H-sele/sternumstöd på komfortrullstolarna Azalea och Azalea flex 3. Monteras på huvud/nackstödet stolpe.

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Infästning övre selar 34591

## Band för arm



### Armbindel

*Ej beställningsbar i Websesam*

Armbindeln monteras diagonalt för att förhindra översträck i armarna.

Levereras i par.

Leverantör Anatomic Sitt [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

Armbindel exklusiv barn/small	20946
Armbindel exklusiv vuxen/large	20709

## Band för fot



### Fotrem med kardborre

Förhindrar att foten glider framåt på fotplattan.

Leverantör Sköldens Industri AB

Fotrem med plös fast 60 cm kardborre	10479
Fotrem med plös elastisk 50 cm kardborre	10478



### Fotrem med skidlås

Förhindrar att foten glider framåt på fotplattan.

Leverantör Sköldens Industri AB

Fotrem med plös fast 60 cm skidlås	23445
Fotrem med plös elastisk 60 cm skidlås	23451



## Vristsele all-in-one



Genom att kroppen balanseras från foten får brukaren ökad kontroll över bål och huvud. Fotleden säkras medan resten av foten kan röra sig naturligt. Belastning på leden minskar och möjligheten till en bekväm och hållbar sittställning med kontroll för hela kroppen ökar.

Leverantör Hea medical

[www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)



Storlek X-Small ankelomkrets 14-17 cm	40786
Storlek Small ankelomkrets 17-20 cm	40784
Storlek Medium ankelomkrets 19-23 cm	39814
Storlek Large ankelomkrets 22-29 cm	39813
Storlek X-Large ankelomkrets 28-33 cm	39729

## Vadmatta



### Vadmatta

Stoppad vadmatta av dartexmaterial med kardborrelåsning.  
Passar all bredder på rullstol Azalea och Azalea flex 3.  
Bredd 77 cm, höjd 20 cm.

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Vadmatta

36229



### Vadmatta Aeromesh

Vadmatta av aeromeshtyg med kardborrelåsning.  
Framsida av luftigt material.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Vadmatta Aeromesh S	26808
Sittbredd 35 – 42 cm, höjd 18,5 cm	
Vadmatta Aeromesh M	26809
Sittbredd 40 – 50 cm, höjd 21 cm	
Vadmatta Aeromesh L	26506
Sittbredd 45 – 55 cm, höjd 23,5 cm	

## Bendelare



### Bendelare

Används för att separera benen. Stabilt skum med viss svikt.

Överdrag beställs separat.

Leverantör Care of Sweden AB [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

Bendelare 9 cm 27851

Bendelare överdrag 9cm 31627

Bendelare 12 cm 27852

Bendelare överdrag 12 cm 31628

Bendelare 15 cm 27853

Bendelare överdrag 15 cm 31629

## Övrigt



### Universalband

Används som stöd för över- och underkropp eller över benen. Bandet har kardborrelås.

Längd 148cm.

Leverantör HEA Medical AB [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Universalband elastiskt S 26517

Bredd 8 cm

Universalband elastiskt L 26567

Bredd 11 cm

Universalband elastiskt XL 36705

Bredd 15 cm

Vid behov av förlängningsband kontakta hjälpmedelskonsulent