

Sortimentsöversikt


Förebyggande och behandlande madrasser mot trycksår

Innehåll

Sårkategorier.....	1
Madrasser	2
Madrass Liljenberg 3-delad.....	2
Madrass Optimal 5 Zon BM	3
Madrass Dacapo Comfort plus.....	4
Madrass Curocell Nova CX 13.....	5
Madrass Curocell S.A.M	6
Madrass Curocell 3 CX13	7
Madrass Curocell 3 CX13	8
Madrass Roho	9
Madrass StarMatt	10
Madrass Curocell 4 PRO	11
Madrass CuroCell AUTO420	12

Sårkategorier

Kategori 1	Vävnadsskada med ökad rodnad. Inflammationstecken. Rodnad som inte bleknar vid tryck.
Kategori 2	Hål på huden, rött sår utan nekroser.
Kategori 3	Gult sår ner till underhuden med nekroser, sekretion och fistlar. Litet ingångshål.
Kategori 4	Genom alla hudlager ner till muskler och ben

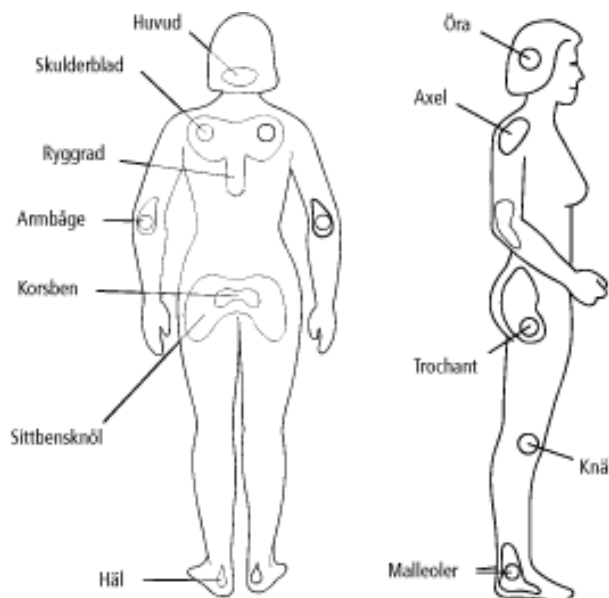

Utsatta kroppspartier
Sättesregionen och hälar är de områden som är mest drabbade av trycksår. Även andra kroppspartier är utsatta och bör få regelbunden kontroll och avlastning.

Läs mer:

<http://www.vardhandboken.se/texter/trycksar/riskbedomning>

Hygienöverdrag = Inkontinensöverdrag

Madrasser

Madrass Liljenberg 3-delad



Förebyggande madrass till brukare med låg risk att utveckla trycksår

Läggs ovanpå befintlig madrass

Fibermadrass i 3 sektioner med överdrag som håller sektionerna på plats

Genom att byta plats på sektionerna förlängs madrassens livslängd

Levereras komplett med tygöverdrag

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 75 kg

Artikelnummer bredd x längd
26866 90 x 200 x 9 cm

31087 **Tillbehör**
Hygientopp 90 x 200 cm

Madrass Optimal 5 Zon BM



Förebyggande madrass och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2

Läggs ovanpå befintlig madrass

Madrasskärna av kallskum

Levereras med hygienöverdrag

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 150 kg

Artikelnummer	bredd x längd x höjd
22771	85 x 200 x 6 cm
34509	90 x 200 x 6 cm
24745	105 x 200 x 6 cm

Madrass Dacapo Comfort plus



Trycksårspåbyggande madrass som understödjer behandling av trycksår kategori 1-2

Placeras direkt på sängbotten

Skumkärna av miljöskum Waterlily med hög volymvikt

Levereras med hygienöverdrag

Får enligt regelverk endast förskrivas till brukare i livets slutskede.
Förskrivs tillsammans med säng

Vid tveksamhet kontakta konsulent med arbetsområde madrasser/sängar

Leverantör Invacare www.invacare.se

Brukarvikt max 40 - 140 kg

Artikelnummer	bredd x längd x höjd
35012	85 x 200 x 14 cm
34583	90 x 200 x 14 cm

Madrass Curocell Nova CX 13



Utgående artikel

Används förebyggande och vid behandling av trycksår t.o.m. kategori 2

Läggs ovanpå befintlig madrass

Luftmadrass som arbetar enligt växeltrycksprincipen, de tre översta cellerna är statiska. Pump med statisk funktion och larm. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".

Levereras med hygienöverdrag

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 150 kg

Artikelnummer bredd x längd x höjd
36266 85 x 200 x 13 cm
36679 90 x 200 x 13 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.

Madrass Curocell S.A.M



Används förebyggande och vid behandling t.o.m. sårkategori 2

Läggs ovanpå befintlig madrass

Statisk madrass med luftceller Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".

Levereras med hygienöverdrag, snabbkoppling av slangarna och kabelhållare

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 200 kg

Artikelnummer bredd x längd x höjd
39710 85 x 200 x 10 cm
39711 90 x 200 x 10 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.

Madrass Curocell 3 CX13



Utgående artikel

Behandlande t.o.m. sårkategori 3

Läggs ovanpå befintlig madrass

Alternierande växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Möjlighet att få statiskt läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning. Har inte hälfunktion. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".

Levereras med hygienöverdrag

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 160 kg

Artikelnummer	bredd x längd x höjd
34803	85 x 200 x 13 cm
34763	90 x 200 x 13 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.

Madrass Curocell 3 CX13



Behandlande t.o.m. sårkategori 3

Läggs ovanpå befintlig madrass

Alternierande växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Möjlighet att få statiskt läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck". Har hälffunktion, med möjlighet att stänga av enstaka celler i de tre nedersta cellerna-

Levereras med hygienöverdrag, kabelhållare och hälavlastning

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 160 kg

Artikelnummer bredd x längd x höjd
39715 85 x 200 x 13 cm
39716 90 x 200 x 13 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.

Madrass Roho



Utgående artikel

Förebyggande och behandlande för brukare med medel- till hög risk eller som redan utvecklat trycksår. Till och med sårkategori 4

Läggs ovanpå befintlig madrass

Modulmadrass i 4 sektioner som sätts ihop med tryckknappar. Varje sektion består av 18 x 11 neoprenceller, förbundna med kanaler. Statisk luftmadrass, utfyllnadsdel kan användas där antidecubitus inte behövs.

Leverantör ETAC www.etac.se

Brukarvikt Obegränsad

Artikelnummer bredd x längd x höjd
85 x 50 x 9 cm

19728 Rohosektion
10324 Utfyllnadsektion

31087 **Tillbehör**
Hygientopp 90 x 200 cm

Restriktioner

Använd aldrig oljebaserade lösningar på madrassen. Brukare som ligger på ROHO ska inte använda produkter som innehåller Lanolin till exempel Decubal. Om produkter med Lanolin används så sker en kemisk reaktion på madrassen och cellerna går sönder.

Madrass StarMatt



Förebyggande och behandlande för brukare med medel- till hög risk eller som redan utvecklat trycksår. Till och med sårkategori 4.

Läggs ovanpå befintlig madrass

Modulmadrass i 4 sektioner som sätts ihop med tryckknappar. Varje sektion består av 18 x 10 neoprenceller, förbundna med kanaler. Statisk luftmadrass, utfyllnadsdel kan användas där antidecubitus inte behövs.

Leverantör ETAC www.etac.se

Brukarvikt Obegränsad

Artikelnummer bredd x längd x höjd
86 x 49 x 10 cm

40431 StarMatt madrassektion
40430 Utfyllnadsektion StarMatt:

Tillbehör
40429 Hygienöverdrag 90 x 200 cm
40428 Förlängningsdel 15 cm

Restriktioner

Använd aldrig oljebaserade lösningar på madrassen. Brukare som ligger på StarMatt ska inte använda produkter som innehåller Lanolin till exempel Decubal. Om produkter med Lanolin används så sker en kemisk reaktion på madrassen och cellerna går sönder.

Madrass Curocell 4 PRO



Behandlande t. o m. sårkategori 4

Fästs direkt på sängbotten

Avancerad växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Möjlighet att få statiskt läge med automatisk återgång, underlättar vid omvårdnad och förflyttning. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck".

Levereras med hygienöverdrag, hälfunktion, kabelhållare, distanstyg och lakanshållare

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 200 kg

Artikelnummer	bredd x längd x höjd
34804	85 x 200 x 21 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
34781	90 x 200 x 21 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.

Madrass CuroCell AUTO420



Behandlande t. o m. sårkategori 4

Fästs direkt på sängbotten

Avancerad växeltrycksmadrass, de tre översta cellerna är statiska. Det finns två olika program att välja mellan växlande och statiskt. Kontrollera alltid att brukaren inte ligger igenom madrassen med "handcheck". Maximalt tryck för omvårdnad, underlätta förflyttning, automatisk återgång efter 30 minuter. Madrassen ställer in sig automatiskt efter brukarens vikt och läge.

Levereras med hygienöverdrag, hälfunktion och kabelhållare

Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se

Brukarvikt max 0 - 250 kg

Artikelnummer bredd x längd x höjd
39528 85 x 200 x 20 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.
39714 90 x 200 x 20 cm Kontakta hjälpmedelskonsulent.