

# Sortimentsöversikt Positioneringskuddar

## Innehåll

Nackkuddar .....	1
Nackkudde Liten .....	1
Nackkudde Stor .....	1
Universalkuddar, Fyrkantskuddar .....	2
Multikudde Rhombo-Med .....	2
Stödkil Curera .....	2
Universalkudde 35x20 cm .....	3
Universalkudde 40x30 cm tvåpack .....	3
Universalkudde 60x30 cm .....	4
Universalkudde, ryggstöds kudde 70x40 cm .....	4
Universalkudde halvmåne .....	5
Böjda kuddar, banankuddar .....	5
S-kudde 170x30 cm .....	5
S-kudde extra stor 210x40 cm .....	6
C-kudde 70x40x25 cm .....	6
C-kudde 90x50x35 cm .....	7
C-kudde 105x70x35 cm .....	7
C-kudde 110x75x40 cm .....	8
Banankudde 120x75x30 cm .....	8
Semifowler .....	9
Semifowler XXS .....	9
Semifowler S .....	9
Semifowler L .....	10
Semifowler XXL .....	10
Trekantskuddar .....	11
Trekantskudde 45x28x28 .....	11
Trekantskudde 60x35x35 .....	11
Specialkuddar .....	12
Öron-avlastningskudde .....	12
Hygienkuddar .....	12
Bananflytkudde S .....	12
Bananflytkudde M .....	12
Bananflytkudde L .....	13
Hygienhalvmåne .....	13
T-flytkudde S .....	13
T-flytkudde L .....	13

## Nackkuddar



### Nackkudde Liten

Art nr 41680

Storlek 32x32x10 cm

Nackkudde med öppen front för att stabilisera huvudet i sittande och liggande position.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag:

Art nr 41709 bomull

Art nr 41703 inkontinens



### Nackkudde Stor

Art nr 41679

Storlek 50x40x20 cm

Nackkudde med öppen front för att stabilisera huvudet i sittande och liggande position.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag:

Art nr 41708 bomull

Art nr 41702 inkontinens

## Universalkuddar, Fyrkantskuddar



### **Multikudde Rhombo-Med**

Utgående artikel

Art nr 26892

Storlek 75x75 cm

Kudden kan formas och placeras under vaderna för att skapa en tryckfri hälvila. I sidoläge kan kudden placeras mellan benen för att skydda utsatta benutskott.

Leverantör Etac, [www.etac.se](http://www.etac.se)

Överdrag:

Art nr 26893 bomull, finjersey

Art nr 26910 hygienöverdrag



### **Stödkil Curera**

Utgående artikel

Art nr 33549

Storlek 70x26x15/5 cm

Används när brukaren har svårt att ligga helt på sidan, för att avlasta i trycksårspåbyggande syfte och när brukaren själv har svårt att ändra viloläge. Vid sidoläge kan två stödkilar användas samtidigt.

Leverantör Care of sweden, [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

Överdrag finns inte



### Universalkudde 35x20 cm

Art nr 37241

Storlek 35x20 cm

Universalkudde som kan användas för att fylla ut och stödja brukaren i olika positioner

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 37242 bomull

Art nr 41699 inkontinens



### Universalkudde 40x30 cm tvåpack

Art nr 42745

Storlek 40x30 cm

Universalkuddarna kommer i tvåpack. De kan användas som huvudkudde eller som positioneringskudde i ryggliggande, sidliggande eller i magliggande läge. Kan även användas för att fylla ut och stödja brukaren i olika positioner.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 42750 bomull, enpack

Art nr 42749 inkontinens, tvåpack

### **Universalkudde 60x30 cm**



Art nr 41678

Storlek 60x30 cm

Universalkudden kan användas som huvudkudde eller som positioneringskudde i ryggliggande, sidoliggande eller i magliggande läge. Passar som avlastning för fötter.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41707 bomull

Art nr 41697 inkontinens

### **Universalkudde, ryggstöds-kudde 70x40 cm**



Art nr 35223

Storlek 70x40 cm

Universalkudden kan användas som huvudkudde eller som positioneringskudde i ryggliggande, sidoliggande eller i magliggande läge. Kudden har mycket tyg och är mindre fylld.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 35227 bomull

Art nr 41698 inkontinens

## Universalkudde halvmåne



Art nr 41677

Storlek 46x22 cm

Universalkudde som kan användas för att fylla ut och stödja brukaren i olika positioner. Kan i sittande fylla ut bröstkyfos kan användas för sidostöd, svankstöd eller som underarmstöd.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41706 bomull

Art nr 41696 inkontinens

## Böjda kuddar, banankuddar

### S-kudde 170x30 cm



Art nr 41674

Storlek diameter 170x30 cm

S-kudden används främst för avlastande sidolägen, bakåt roterat i 30 grader eller framåt roterat i 120 grader. Kuddens form gör den lätt att placera i säng och stödja brukaren från topp till tå. S-kuddens nedre del placeras mellan benen för att ge en symmetrisk och stabil position. För brukare upp till 175 cm.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag:

Art nr 41689 bomull

Art nr 41686 inkontinens

### **S-kudde extra stor 210x40 cm**



Art nr 43299

Storlek 210x40 cm

S-kudden används främst för avlastande sidolägen, bakåt roterat i 30 grader eller framåt roterat i 120 grader. Kuddens form gör den lätt att placera i säng och stödja brukaren från topp till tå. S-kuddens nedre del placeras mellan benen för att ge en symmetrisk och stabil position. För brukare över 175 cm.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 42400 bomull

Art nr 43071 inkontinens

### **C-kudde 70x40x25 cm**



Art nr 35225

Storlek 70x40x25 cm

C-kudden kan användas som bord/ underarmstöd i sittande och halvsittande position. Kan även användas för att skapa stabila och neutrala positioner för arm/ben i ryggläge eller i sidoläge. Magläge över kudden möjliggör aktivitet i nacke, brösttrygg samt underlättar stimulans av öga-hand kontroll. Kan även användas som ett mycket stabilt nackstöd

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 35229 bomull

Art nr 41701 inkontinens





### **C-kudde 90x50x35 cm**

Art nr 35224

Storlek 90x50x35 cm

C-kudden kan användas som bord/ underarmstöd i sittande och halvsittande position. Kan även användas för att skapa stabila och neutrala positioner för arm/ben i ryggläge eller i sidoläge. Magläge över kudden möjliggör aktivitet i nacke, brösttrygg samt underlättar stimulans av öga-hand kontroll. Kan även användas som ett mycket stabilt nackstöd

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 35228 bomull

Art nr 41700 inkontinens



### **C-kudde 105x70x35 cm**

Art nr 41676

Storlek 105x70x35 cm

C-kudden stabilisera bålen och ger ett underarmstöd i sittande och halvsittande position. Kan även användas för att skapa stabila positioner i ryggläge eller i sidoläge.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41705 bomull

Art nr 41695 inkontinens



### **C-kudde 110x75x40 cm**

Art nr 41675

Storlek 110x75x40 cm

C-kudden stabilisera bålen och ger ett underarmstöd i sittande och halvsittande position. Kan även användas för att skapa stabila positioner i ryggläge eller i sidoläge.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41704 bomull

Art nr 41694 inkontinens



### **Banankudde 120x75x30 cm**

Art nr 42746

Storlek 120x75x30 cm

Banankudden kan användas i flera olika positioner för att ge brukaren stabila vilolägen. Passar brukare över 150 cm.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 42748 bomull

Art nr 42747 inkontinens

## Semifowler



### Semifowler XXS

Art nr 41682

Storlek 41x30x8 cm

Semi-Fowler kuddens avfasade del placeras en liten bit in under låret för att motverka WSH. Abduktionsdelen ger en mjuk separation av lårbenen. Genom att åstadkomma flektion/abduktion minskar risken för sträckspasticitet. Kudden kan också användas i magläge eller som huvud och bålstöd i ryggliggande.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41713 bomull

Art nr 41712 inkontinens



### Semifowler S

Art nr 34912

Storlek 55x40x10 cm

Semi-Fowler kuddens avfasade del placeras en liten bit in under låret för att motverka WSH. Abduktionsdelen ger en mjuk separation av lårbenen. Genom att åstadkomma flektion/abduktion minskar risken för sträckspasticitet. Kudden kan också användas i magläge eller som huvud och bålstöd i ryggliggande.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41692 bomull

Art nr 41690 inkontinens

### **Semifowler L**



Art nr 34910

Storlek 70x50x12 cm

Semi-Fowler kuddens avfasade del placeras en liten bit in under låret för att motverka WSH. Abduktionsdelen ger en mjuk separation av lårbenen. Genom att åstadkomma flektion/abduktion minskar risken för sträckspasticitet. Kudden kan också användas i magläge eller som huvud och bålstöd i ryggliggande.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 35226 bomull

Art nr 41687 inkontinens

### **Semifowler XXL**



Art nr 41681

Storlek 88x63x15 cm

Semi-Fowler kuddens avfasade del placeras en liten bit in under låret för att motverka WSH. Abduktionsdelen ger en mjuk separation av lårbenen. Genom att åstadkomma flektion/abduktion minskar risken för sträckspasticitet. Kudden kan också användas i magläge eller som huvud och bålstöd i ryggliggande.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41710 bomull

Art nr 41711 inkontinens

## Trekantskuddar



### Trekantskudde 45x28x28

Art nr 34913

Storlek 45x28x28 cm

Trekantskudden kan användas som ryggstöds kudde i sidliggande position. För att ge stöd åt underbenen i halvsittande/ryggliggande position kan kudden placeras under knäleden.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41693 bomull

Art nr 41691 inkontinens



### Trekantskudde 60x35x35

Art nr 41673

Storlek 60x35x35 cm

Trekantskudden kan användas som ryggstöds kudde i sidliggande position. För att ge stöd åt underbenen i halvsittande/ryggliggande position kan kudden placeras under knäleden.

Leverantör Togemo, [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag

Art nr 41688 bomull

Art nr 41685 inkontinens

## Specialkuddar



### Öron-avlastningskudde

Art nr 35067

Storlek 30x30 cm

Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer från hakspetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår.

Leverantör Togemo AB [www.togemo.se](http://www.togemo.se)

Överdrag:  
Art nr 37608 tvåpack

## Hygienkuddar



### Bananflytkudde S

Art nr 38867

Storlek 50x90 cm

Fungerar som ett stöd i hygienstol och/eller duschbrits

Leverantör URIFORM [www.tumble.uriform.se](http://www.tumble.uriform.se)



### Bananflytkudde M

Art nr 34753

Storlek 62x110 cm

Fungerar som ett stöd i hygienstol och/eller duschbrits

Leverantör URIFORM [www.tumble.uriform.se](http://www.tumble.uriform.se)



### **Banflytkudde L**

Art nr 40718

Storlek 76x125 cm

Fungerar som ett stöd i hygienstol och/eller duschbrits

Leverantör URIFORM [www.tumble.uriform.se](http://www.tumble.uriform.se)



### **Hygienhalvmåne**

Art nr 40717

Storlek 21x47 cm

Fungerar som ett stöd i hygienstol och/eller duschbrits

Leverantör URIFORM [www.tumble.uriform.se](http://www.tumble.uriform.se)



### **T-flytkudde S**

Art nr 43093

Storlek 38x60 cm

Fungerar som ett stöd i hygienstol och/eller duschbrits

Leverantör URIFORM [www.tumble.uriform.se](http://www.tumble.uriform.se)



### **T-flytkudde L**

Art nr 37386

Storlek 50x78 cm

Fungerar som ett stöd i hygienstol och/eller duschbrits

Leverantör URIFORM [www.tumble.uriform.se](http://www.tumble.uriform.se)