

## Sortimentsöversikt

Uppresningsstöd/sängbygel

Lyftbåge

Filtstöd

Sängryggstöd

Sängar

## Innehåll

Uppresningsstöd/Sängbygel.....	1
Parnell Premier uppresningsstöd .....	1
Uppresning Eva .....	1
Sängbygel Reko .....	2
Lyftbåge .....	3
Lyftbåge fristående med sänglåsning.....	3
Filtstöd .....	3
Filtstöd fristående .....	3
Sängryggstöd .....	4
Sängryggstöd MerryBack - Manuellt .....	4
Comfortabel sängryggstöd - El.....	4
Sängar .....	5
Scanbeta NG .....	5
Scanbeta NG .....	5
Ärendegång beställning av säng.....	6
ScanBed 755 .....	6
ScanBed 755 .....	6
Tillbehör Scanbed 755 Art nr 31372 .....	7
Tillbehör Scanbed 755 Art nr 36735 .....	8
Tillbehör Scanbed 755 / Båda modellerna.....	9

## Uppresningsstöd/Sängbygel



### Parnell Premier uppresningsstöd

Utgående artikel

Parnell Premier är ett uppresningsstöd som gör det lättare att resa sig och gå ur sängen. Den placeras på golvet vid sängen - kan användas till alla typer av sängar. Stödet består av två ben som skjuts in under sängen. Plattan placeras vid sängens långsida. Med skruven i handtagets centrum säkras handtaget. Bottenplattan är plan så att brukaren lätt kan ta sig till sängen med t ex en rullstol eller rollator. Golvramens längd 81 cm och bredden är 41 cm. Handtagets höjd är 81 cm och bredden är 28 cm. Handtagskrokarna är 7,5 cm på insidan, avståndet mellan krokarnas insida och ut till krokens spets är 4 cm. Får ej kombineras med förhöjningsklossar.

Leverantör Euforia [www.euforia.se](http://www.euforia.se)

Brukarvikt max	115 kg
Golvrams bredd	41 cm
Golvrams djup	81 cm
Höjd	7 cm

Art nr 36467



### Uppresning Eva

Avsedd att användas vid säng som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte rulla ur säng.

Sängramen ska bestå av massivt trä och bredden av sängramens underkant bör vara 2 - 5,5 cm. Sängbygel 97 cm används när sängen har hög madrass ex kontinentalsäng.


Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar bör dessa klossar omsluta eller sitta fast i sängens ben. Produkten bör ej fästas på sängar med medar.

Leverantör Karo Pharma Sverige AB [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Brukarvikt max	150 kg
Totalhöjd	85 cm alt 97 cm
Totalbredd	33cm, 30 cm mellan byglarna

Art nr	
42037	Uppresning Eva inkl bygel 85
42038	Uppresning Eva inkl bygel 97

## Sängbygel Reko

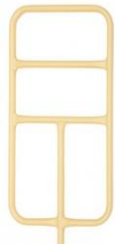

Den lilla sängbygel är avsedd att användas på säng som stöd/vändhandtag. Den stora som skydd för att inte rulla ur sängen. Bygel kan lätt lyftas av och på så att man kan bädda. Passar sängar med bredd mellan 80-140 cm.

[Specifikation](#) ska användas.

Uppresningsstöd Parnell Premier ska användas i första hand.

Leverantör Karo Pharma Sverige AB [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr  
12960  
12961

Stor  
Liten

## Lyftbåge



### Lyftbåge fristående med sänglåsning

Används för lägesändring i säng såsom högre upp i säng, bäckenlyft eller ändring av liggställning.

Glöm inte att höjjustera bandet mellan grepptriangel och lyftbåge för att passa brukaren.

Fästanordningen kan även flyttas bakåt på däverten.

Ju tyngre brukare desto längre bakåt ska fästanordningen sitta. Se bruksanvisningen för ungefärliga måttangivelser.

Leverantör Humancare AB [www.humancare.se](http://www.humancare.se)

Belastningsvikt max 70 kg

Art nr 11630

## Filtstöd



### Filtstöd fristående

Placeras i fotändan för att avlasta tryck från täcket på benen/fötterna.

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Art nr 33508

## Sängryggstöd



### Sängryggstöd MerryBack - Manuellt

Sängryggstödet är manuellt inställningsbart mellan 0-70 ° i nio fasta lägen. Den låga höjden gör att inget obehagligt mellanrum bildas mellan ryggstöd och sängbotten.

Leverantör Sanicare AB [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)

Brukarvikt max	100 kg
Bredd	78 cm
Längd	70 cm
Vikt	6 kg

Art nr 12956



### Comfortabel sängryggstöd - El

Sängryggstödet placeras på en befintlig säng, mellan madrass och bäddmadrass, och fixeras med hjälp av spännband. Med hjälp av sidomonterad motor (dubbla sidoplacerade motorer på 120 cm) kan ryggstödet höjas upp till bekväm sittställning.

Motorn kan enkelt anpassas utan verktyg till placering på höger eller vänster sida. Vid nybeställning ange sida för motorns placering på avsedd plats i WebSesam.

Leverantör Comfort System [www.comfortsystem.se](http://www.comfortsystem.se)

Brukarvikt max	145 kg
Belastningsvikt max	70 kg

Art nr	
39766	80 cm
25726	90 cm
25727	105 cm
26214	120 cm

Tillbehör	
25742	Sittlås
31708	Spännband 350 cm (styck)

## Sängar

### Scanbeta NG



Utgående artikel

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Brukarvikt max 70 kg  
Lägsta/högsta höjd 30 cm/85 cm

Artnr 34126 60x140 cm 2-delad, el-rygg, manuell lår/bendel  
Artnr 34127 80x180 cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, manuell bendel

Kontakta konsulent med sortimentsansvar barnhjälpmedel

### Scanbeta NG



Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Brukarvikt max 70 kg  
Lägsta/högsta höjd 30 cm/90 cm

Artnr 42163 70x160 cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, centralbroms  
Artnr 42164 80x180 cm 4-delad, el-rygg, el-lårdel, centralbroms

Kontakta konsulent med sortimentsansvar barnhjälpmedel.

## Ärendegång beställning av säng

Förskrivning av sängar till vuxen sker i webbsam och består av två delar.

- Fyll i [leveransunderlag](#) säng. Spara underlaget på din dator.
- Bifoga underlaget i webbsambeställningen. Se [rutin](#) för ytterligare information.

### ScanBed 755



Utgående artikel.

4-delad sängbotten. Samtliga delar elektriskt justerbara.

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Brukarvikt max 185 kg  
Lägsta/högsta höjd 34 cm/80 cm (golv till sängbotten)

Art nr 31372 90x200 cm

### ScanBed 755



4-delad sängbotten. Samtliga delar elektriskt justerbara.

Leverantör Invacare AB [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Brukarvikt max 200 kg  
Lägsta/högsta höjd 34 cm/80 cm (golv till sängbotten)

Art nr 36735 90x200 cm



## Tillbehör Scanbed 755 Art nr 31372



Art nr 31368 (par)  
Sänggavel Sanne sänkt 5 cm  
Standardkomponent



Art nr 19279 (par)  
Sänggrind Britt III trä fällbar  
Standardkomponent



Art nr 20000 (styck)  
Grindskydd polstrat galon  
Britt III



Art nr 19682 (styck)  
Grindskydd nät Britt III



Art nr 33149 (styck)  
Grindförhöjning +15 cm Britt  
Passar till Britt III och V



Art nr 35109  
Grindskydd polstrat till  
sänggrind med grindförhöjning

## Tillbehör Scanbed 755 Art nr 36735



Art nr 36736 (par)  
Sänggavel Susanne sänkt 5 cm  
Standardkomponent



Art nr 36231 (par)  
Sänggrind Britt V fällbar  
Standardkomponent



Art nr 36713 (styck)  
Grindskydd polstrat galon  
Britt V



Art nr 34092 (styck)  
Grindskydd nät Britt V



Art nr 31374 (par)  
Förlängd sänggrind Line fällbar  
(0-20 cm)



Art nr 41327 (styck)  
Grindskydd förl +5-10 cm  
polstrat  
Passar Britt V och Line



33069 (styck)  
Grindskydd förl +10-20 cm  
polstrat  
Passar Britt V och Line



Art nr 33149 (styck)  
Grindförhöjning +15 cm Britt



Art nr 34091 (styck)  
Grindförhöjning +15 till Line



Art nr 35109 (styck)  
Grindskydd polstrat till  
sänggrind med grindförhöjning  
Passar Britt V och Line

## Tillbehör Scanbed 755 / Båda modellerna



Art nr 36751  
Lyftbåge med trapets



Art nr 36757  
Uppresningsstöd 46 cm



Art nr 36753  
Stöd-/vändhandtag 40x30 cm



Art nr 36752  
Stöd-/vändhandtag 25x30 cm



Art nr 37687  
Stöd/uppresningsstöd svängbart



Art nr 32632  
Manöverdosa  
Standardkomponent



Art nr 32617  
Lågbyggnadssats  
Lägsta/högsta höjd 24,5 cm/72,5  
cm. Mobil personlyft kan inte  
användas.



Art nr 23801  
Manöverdosa  
Manöverdosa med lätttryckta  
Knappar.